

VEB ARZNEIMITTELWERK DRESDEN



MSP K-12 МЗП К-12

Hergestellt für die bewaffneten Organe gemäß TLB 3421


Индивидуальный медицинский защитный пакет

Произведено для вооружённых сил в соответствии с TLB 3421

Charge
Серия № 01 04 80


Bedienungsanleitung Инструкция о пользовании

3. Öffnen des Spritzenbehältnisses durch Abdrehen der Verschlusskappe

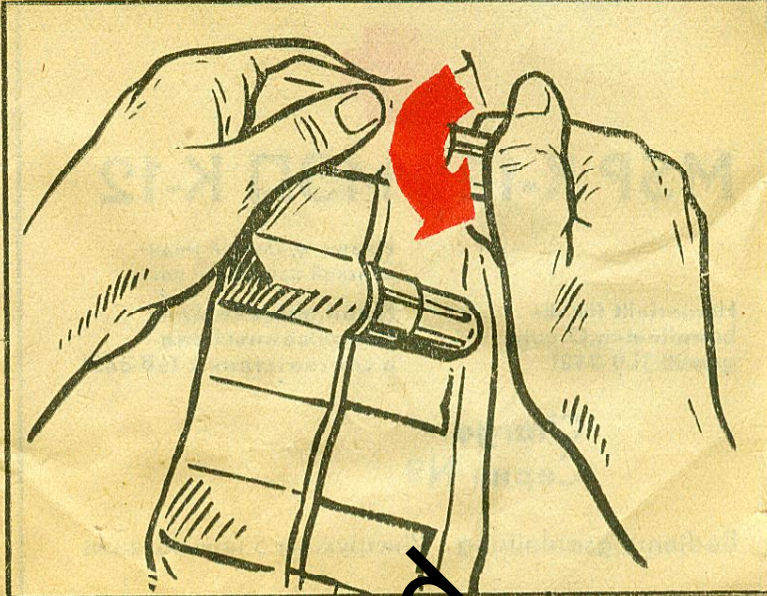

Das MSP K-12 wird in der Selbsthilfe und gegenseitigen Hilfe angewendet.

4. Entnahme der Schnellspritze aus dem Behältnis

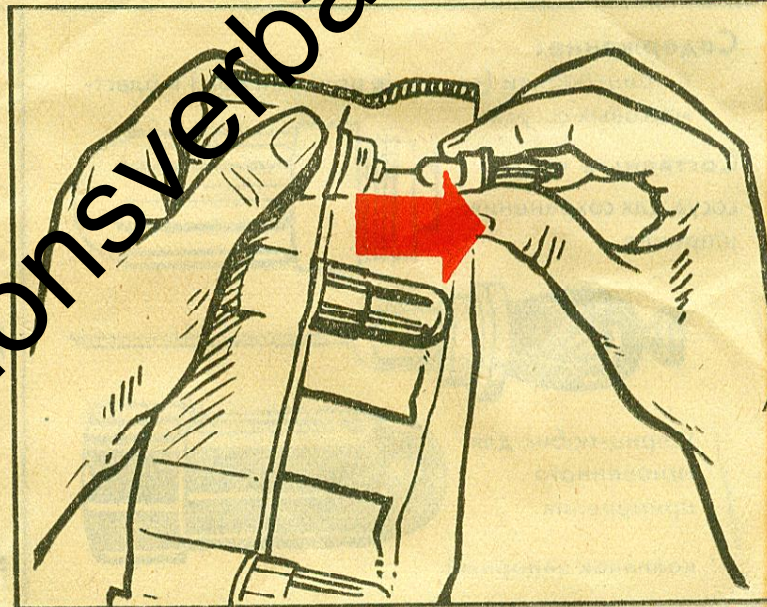


Inhalt:

Schnellspritzen (sofort anwendbar) in Plastikbehältnissen


Bestandteile:

Spritzenbehältnis

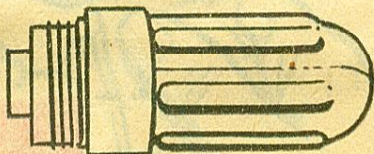

Schnellspritze

Verschlusskappe

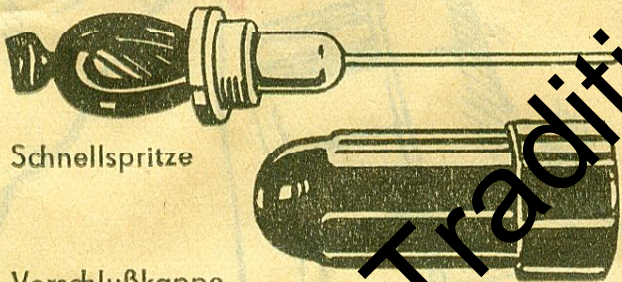

Anwendung:

1. Öffnen des MSP durch Aufziehen der Lasche
2. Aufsuchen der benötigten Schnellspritze

bei Sehstörungen (ohne Brennen der Augen) mit Atemnot
bei Sehstörungen mit starkem Speichelfluß
oder auf Befehl

ROTE SCHNELLSPRITZE

verschwinden die Störungen nach 15-20 Minuten nicht

ZWEITE ROTE SCHNELLSPRITZE

bei Übelkeit oder Brechreiz oder auf Befehl


GRÜNE SCHNELLSPRITZE

bei starken Schmerzen

WEISSE SCHNELLSPRITZE

nach einer Stunde
ZWEITE WEISSE SCHNELLSPRITZE

5. Kräftiges Einstechen der Schnellspritze in den Oberschenkel - außen (durch die Bekleidung oder Schutzbekleidung)

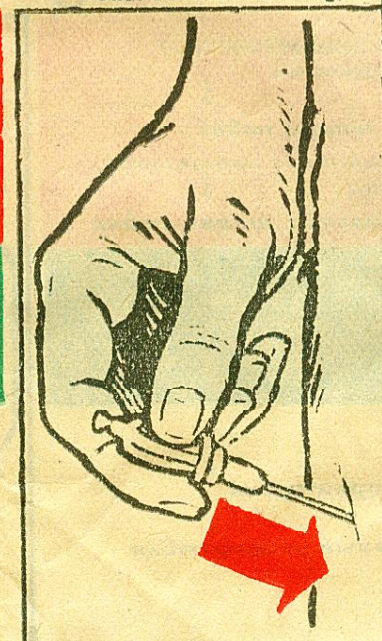

6. Ausspritzen der Schnellspritze durch Zusammendrücken des Spritzenbalges

